




# Biodesign™

## PLUGUE PARA FISTULA SURGISIS®

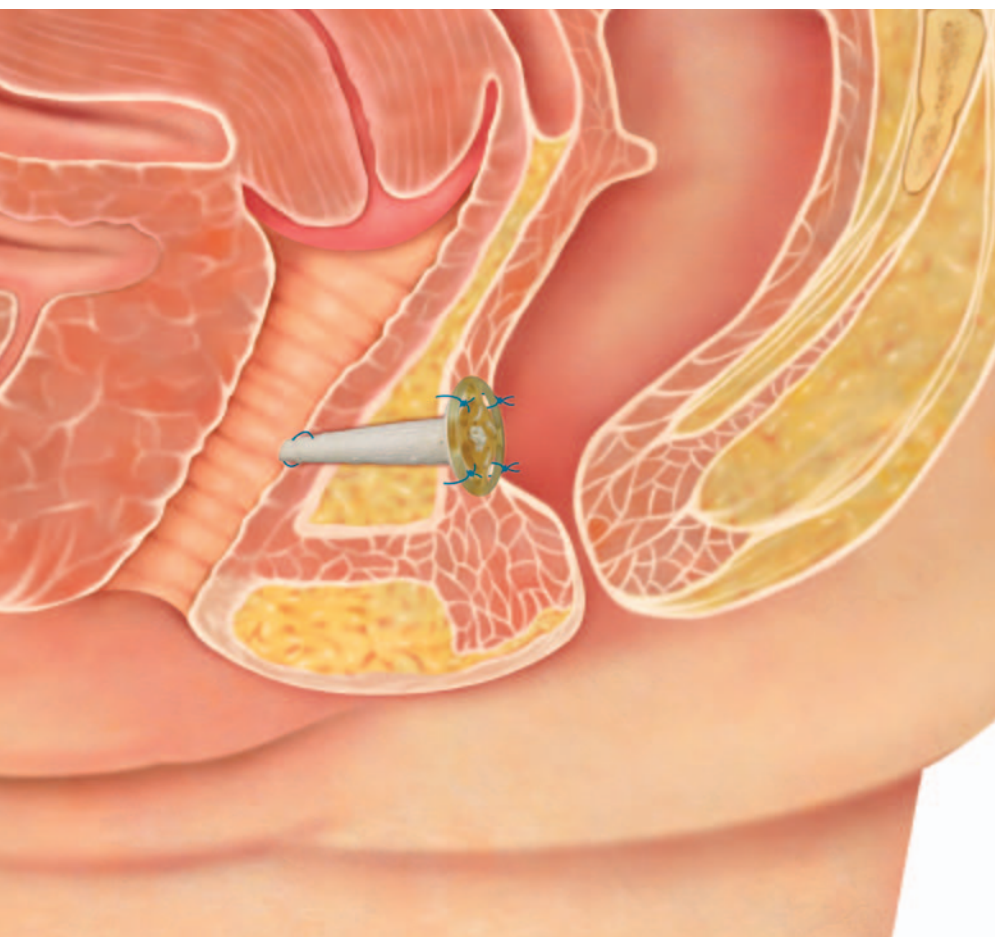

### Restaurar a qualidade de vida anteriormente impossível.

Mulheres que sofrem de fístulas retovaginais apresentam sintomas dolorosos e constrangedores que alteram completamente sua qualidade de vida. Muitas dessas mulheres não revelam seu problema e não sabem que existe uma solução simples.

O plugue para fístula Biodesign oferece uma solução para o fechamento da fístula. O Biodesign comunica-se com o corpo do seu paciente, enviando sinais para que as células adjacentes cresçam através da estrutura de suporte. O resultado é um tecido vascularizado totalmente remodelado e o fechamento completo da fístula. Mais do que isso, o Biodesign oferece os melhores aspectos de um enxerto biológico – a remodelagem natural e a resistência a infecções – ao mesmo tempo que é fácil de usar e prontamente disponível.

Cook Medical – Projetando soluções simples para tratar condições difíceis.

Referência global do produto	Código do produto	Tamanho cm
<b>Plugue para fístula</b>		
G48651	C-RVP-0.2	0,2
G48652	C-RVP-0.4	0,4
G48653	C-RVP-0.7	0,7
<b>Enxerto de tecido com 4 camadas</b>		
G13181	C-SLH-4S-4X7	4 x 7
G12580	C-SLH-4S-7X10	7 x 10

O enxerto de tecido com 4 camadas Biodesign é uma alternativa para os tratamentos de fístula retovaginal com diâmetro maior do que 8 mm e comprimento menor do que 1 cm.

[www.cookmedical.com/biodesign](http://www.cookmedical.com/biodesign)



## RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Fácil de reidratar e suturar.
- Cria tecido vivo e funcional.
- Causa o mínimo de cicatrizes.
- Recupera a forma e a função naturais.

## DICAS

- Use um **tamanho de plugue que se adapte firmemente** no trato da fístula. Para tratos da fístula de 1 mm a 2 mm, recomenda-se o plugue de 2 mm. Para tratos de 2 mm a 4 mm, use um plugue de 4 mm e para os de 4 mm a 7 mm, use um de 7 mm.
- **Desate suavemente o trato da fístula** com uma sonda ou escova pequena para remover o tecido não-vascularizado.
- **Coloque pontos absorvíveis** através do botão na abertura da fístula retal.
- Após a cirurgia, **os pacientes devem limitar as atividades** a uma caminhada leve. Relações sexuais e outras formas de penetração vaginal/retal não são recomendadas por, no mínimo, 6 semanas.

## DADOS

1. Champagne BJ, O'Connor LM, Ferguson MA, et al. Efficacy of anal fistula plug in closure of cryptoglandular fistulas: long-term follow-up. *Dis Colon Rectum*. 2006;49(12):1817-1821.
2. Ellis CN. Bioprothetic plugs for complex anal fistulas: an early experience. *J Surg Educ*. 2007;64(1):36-40.
3. Johnson EK, Gaw JU, Armstrong DN. Efficacy of anal fistula plug vs. fibrin glue in closure of anorectal fistulas. *Dis Colon Rectum*. 2006;49(3):371-376.
4. O'Connor L, Champagne BJ, Ferguson MA, et al. Efficacy of anal fistula plug in closure of Crohn's anorectal fistulas. *Dis Colon Rectum*. 2006;49(10):1569-1573.

## ÁREAS DE PROCEDIMENTO

REPARO DE HÉRNIA

REPARO DE FÍSTULA

CIRURGIA PLÁSTICA E RECONSTRUTIVA/  
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

REFORÇO DA LINHA DE  
GRAMPEAMENTO

REPARO DA DOENÇA DE PEYRONIE

RESTAURAÇÃO DA CONTINÊNCIA

REPARO DURAL

REPARO DO SOALHO PÉLVICO

FÍSTULA RETOVAGINAL  
PLUGUE PARA FÍSTULA  
ENXERTO DE TECIDO COM  
4 CAMADAS  
FÍSTULA ANAL  
FÍSTULA ENTEROCUTÂNEA

## EVOLUÇÃO NO REPARO DE TECIDO



O Biodesign é uma tecnologia inovadora que envia sinais e oferece suporte para que o corpo se recupere sozinho. Ela incorpora os melhores atributos de um enxerto biológico - remodelagem completa e resistência a infecções - além de ser fácil de usar e de encontrar e ter um preço acessível.



[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)

### COOK MEDICAL INCORPORATED

P.O. Box 4195, Bloomington, IN 47402-4195 U.S.A.  
Phone: 812.339.2235, Toll Free: 800.457.4500, Toll Free Fax: 800.554.8335

### COOK (CANADA) INC.

111 Sandiford Drive, Stouffville, Ontario, L4A 7X5 CANADA  
Phone: 905.640.7110, Toll Free: 800.668.0300

### WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY. LTD.

95 Brandl Street, Brisbane Technology Park, Eight Mile Plains  
Brisbane, QLD 4113 AUSTRALIA, Phone: +61 7 3841 1188

### COOK IRELAND LTD.

O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND  
Phone: 353 613 34440

© COOK 2009 SUR-BM-RVF-PT-BR-200904

AORTIC  
INTERVENTION

CARDIOLOGY

CRITICAL  
CARE

ENDOSCOPY

INTERVENTIONAL  
RADIOLOGY

PERIPHERAL  
INTERVENTION

**SURGERY**

UROLOGY

WOMEN'S  
HEALTH