




Biodesign™

SUPORE URETRAL LIVRE DE TENSÃO SURGISIS®

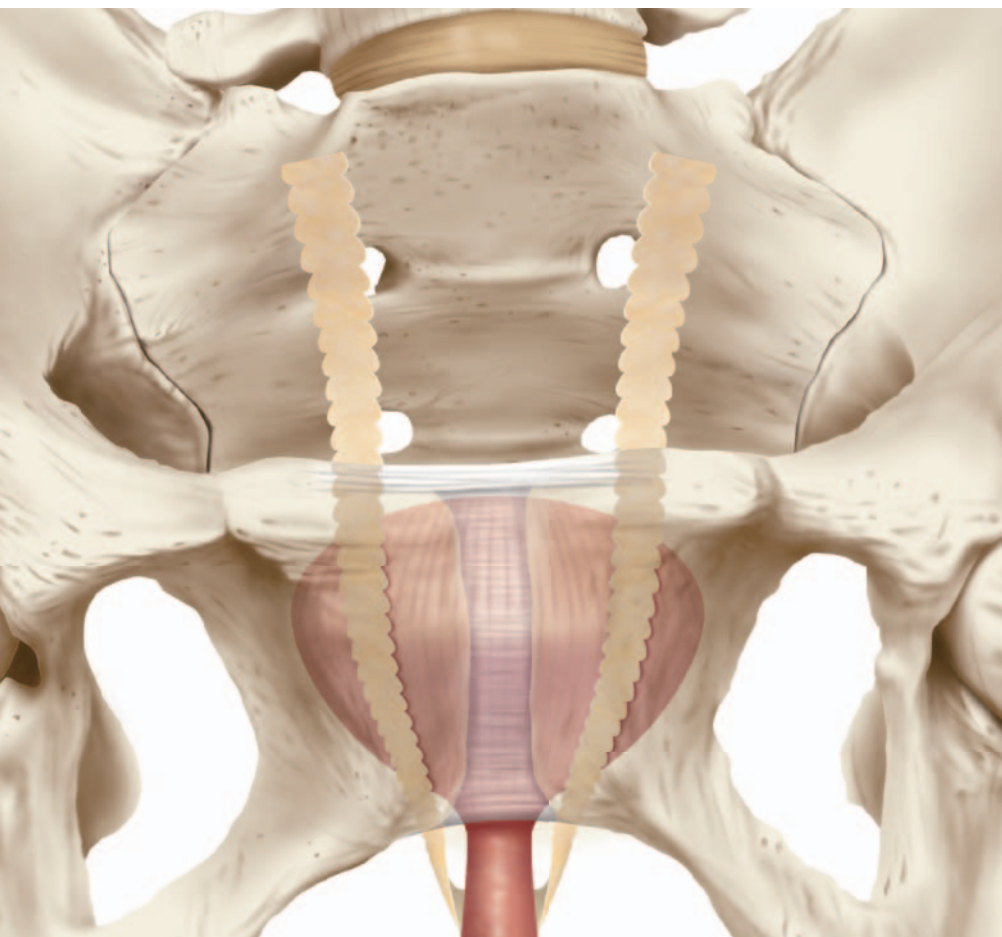

Restaure a continência sem comprometer os efeitos a longo prazo.

As mulheres que sofrem de incontinência urinária de esforço programam seu cotidiano com base em sua incontinência, frequentemente sem saber que há uma solução ambulatorial simples para essa condição constrangedora.


O suporte uretral livre de tensão Biodesign oferece uma abordagem minimamente invasiva para restaurar a continência do seu paciente. Esse suporte livre de tensão foi projetado especialmente para a uretra e o colo da bexiga.

O Biodesign comunica-se com o corpo do seu paciente, enviando sinais para que as células adjacentes cresçam através da estrutura de suporte. Como consequência, o corpo se restaura sozinho, obtendo uma remodelagem que gera um tecido funcional resistente sem os efeitos colaterais negativos como erosão ou encapsulação.

Cook Medical – Expandindo as aplicações do reparo avançado de tecido.

Referência global do produto	Código do produto	Tamanho cm
Kit de suporte uretral livre de tensão		
G27202	J-STFK-8-2X40	2 x 40
Suporte uretral		
G18752	J-USLH-4S-2X10	2 x 10
G18753	J-USLH-4S-2X20	2 x 20
G18835	J-USLH-4S-2X30	2 x 30
G18782	J-USLH-4S-3.5X15	3,5 x 15

Enxerto de tecido com 4 camadas			
G52411	J-PFV-2X20	2 x 20	(perfurado)

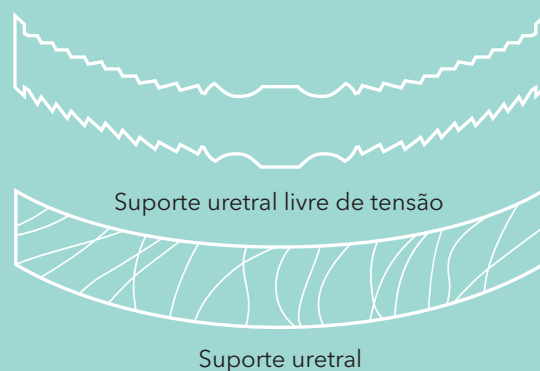

Enxerto de tecido com 4 camadas

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Reidrata-se rapidamente.
- Causa o mínimo de cicatrizes.
- Resistente a migração e a erosão.
- Recupera a forma e a função naturais.

DICAS

- Para evitar a irritação dos tecidos adjacentes, **realize uma transecção** do material de suporte no nível da fáscia do reto.
- Use somente antissépticos e antimicrobianos cuja eficácia contra feridas tenha sido comprovada. Alguns problemas com gentamicina, povidona-iodo, bacitracina, polimixina B e vancomicina foram relatados.
- O suporte uretral livre de tensão Bidesign pode ser colocado com a técnica anterógrada ou retrógrada.
- Após a cirurgia, os pacientes devem abster-se de levantamento de pesos, exercícios árduos e relações sexuais por um período de 4 a 6 semanas.

DADOS

1. Colvert JR 3rd, Kropp BP, Cheng EY, et al. The use of small intestinal submucosa as an off-the-shelf urethral sling material for pediatric urinary incontinence. *J Urol.* 2002;168(4, pt 2):1872-1875.
2. Jones JS, Rackley RR, Berglund R, et al. Porcine small intestinal submucosa as a percutaneous mid-urethral sling: 2-year results. *BJU Int.* 2005;96(1):103-106.
3. Jones JS, Vasavada SP, Abdelmalak JB, et al. Sling may hasten return of continence after radical prostatectomy. *Urology.* 2005;65(6):1163-1167.
4. Rutner AB, Levine SR, Schmaelzle JF. Processed porcine small intestine submucosa as a graft material for pubovaginal slings: durability and results. *Urology.* 2003;62(5):805-809.

5. Wiedemann A, Otto M. Small intestinal submucosa for pubourethral sling suspension for the treatment of stress incontinence: first histopathological results in humans. *J Urol.* 2004;172(1):215-218.
6. Califano J, Slobodov G, Oguejiofor IK, et al. Small intestine submucosa sling for treatment of stress urinary incontinence: a retrospective review. *J Pelvic Med Surg.* 2007;13(5):312.

ÁREAS DE PROCEDIMENTO

REPARO DE HÉRNIA
REPARO DE FÍSTULA
CIRURGIA PLÁSTICA E RECONSTRUTIVA/
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
REFORÇO DA LINHA DE GRAMPEAMENTO
REPARO DA DOENÇA DE PEYRONIE
RESTAURAÇÃO DA CONTINÊNCIA
REPARO DURAL
REPARO DO SOALHO PÉLVICO

INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO
SUPORTE URETRAL LIVRE DE TENSÃO
SUPORTE URETRAL

EVOLUÇÃO NO REPARO DE TECIDO



O Bidesign é uma tecnologia inovadora que envia sinais e oferece suporte para que o corpo se recupere sozinho. Ele incorpora os melhores atributos de um enxerto biológico - remodelagem completa e resistência a infecções - além de ser fácil de usar e de encontrar e ter um preço acessível.



www.cookmedical.com

COOK MEDICAL INCORPORATED

P.O. Box 4195, Bloomington, IN 47402-4195 U.S.A.
Phone: 812.339.2235, Toll Free: 800.457.4500, Toll Free Fax: 800.554.8335

COOK (CANADA) INC.

111 Sandiford Drive, Stouffville, Ontario, L4A 7X5 CANADA
Phone: 905.640.7110, Toll Free: 800.668.0300

WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY. LTD.

95 Brandl Street, Brisbane Technology Park, Eight Mile Plains
Brisbane, QLD 4113 AUSTRALIA, Phone: +61 7 3841 1188

COOK IRELAND LTD.

O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND
Phone: 353 613 34440

© COOK 2009 SUR-BM-TFUS-PT-BR-200904

AORTIC
INTERVENTION

CARDIOLOGY

CRITICAL
CARE

ENDOSCOPY

INTERVENTIONAL
RADIOLOGY

PERIPHERAL
INTERVENTION

SURGERY

UROLOGY

WOMEN'S
HEALTH